


検査手順例

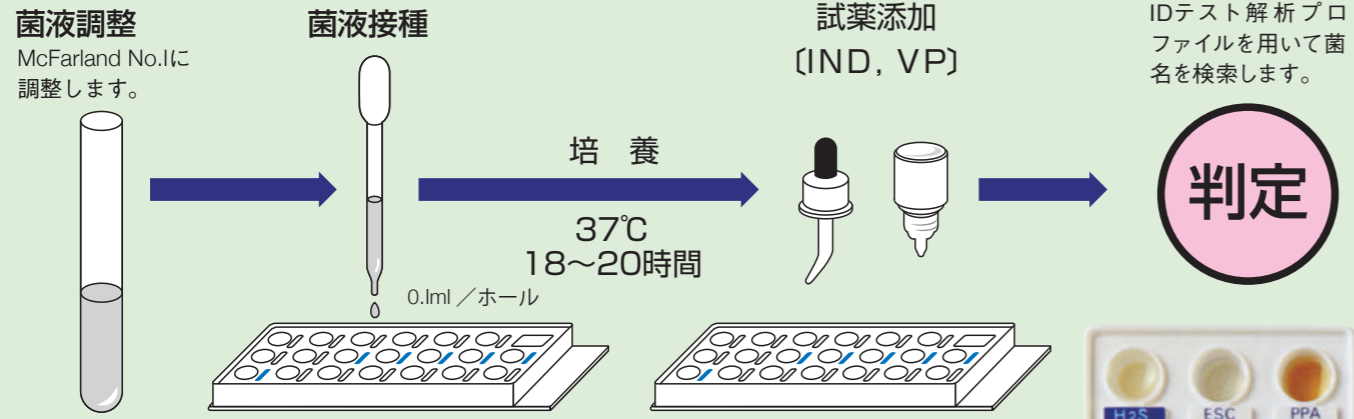

※検査手順はキットにより異なりますので、添付文書をよく読んでから使用してください。

成績表記入例

IDテスト・EB-20 年月日 _____ 患者名 _____

成績表 検体名 _____ 検査者 _____


日本製薬株式会社

グラム染色 **グラム陰性桿菌** ブドウ糖OF **F** オキシダーゼ **-**

H ₂ S	ESC	PPA	IND	VP	CIT	LDC	ADH	ODC	ONPG	URE	MALO	ADO	INO	RAFF	RHA	SOR	SUC	MAN	ARA	運動性
-	-	-	+	-	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	+	+	-	+	+	+
0	1	5	1	0	3	3														

菌名 **Escherichia coli** 備考 _____

追加テスト _____

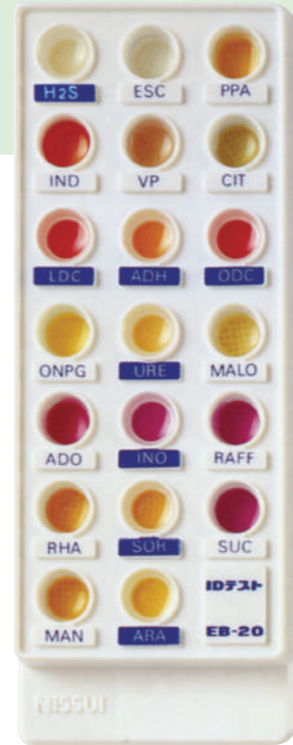

IDテスト解析ソフトウェア(Web版)

<https://kmk-ss.net/nsi/login.php>

IDテストの生化学的性状の成績から得られたコードを解析プロファイルに入力するだけで、菌種を選択することができます！
また、使用説明、試薬添付文書、判定色調表、判定見本も確認することができます。



IDテスト「ニッスイ」シリーズ

色の変化による判定でより正確な同定を

IDテスト「ニッスイ」シリーズは、微量テスト法と数値分類法に基づいて開発された簡易同定用キットです。

- ・反応の結果が明瞭な色で判定でき、正確な同定が可能
- ・3項目ごとの配列でコード化しやすく、小型で積み重ねても安定
- ・プレートは室温保存で1年間安定

IDテスト・EB-20「ニッスイ」ブドウ糖発酵性グラム陰性桿菌

承認番号 16100AMZ03213000

Actinobacillus 属 6 菌種 Aeromonas 属 3 菌種 Avibacterium 属 2 菌種 Budvicia 属 1 菌種 Buttiauxella 属 1 菌種 Cedecea 属 3 菌種 Citrobacter 属 4 菌種 Cronobacter 属 1 菌種 Edwardsiella 属 3 菌種 Enterobacter 属 7 菌種 Escherichia 属 5 菌種 Ewingella 属 1 菌種 Gallibacterium 属 1 菌種 Grimontia 属 1 菌種 Hafnia 属 2 菌種 Klebsiella 属 4 菌種 Kluyvera 属 3 菌種 Leclercia 属 1 菌種 Leminorella 属 2 菌種 Moellerella 属 1 菌種 Morganella 属 2 菌種	Pantoea 属 1 菌種 Pasteurella 属 7 菌種 Photobacterium 属 Plesiomonas 属 1 菌種 Proteus 属 3 菌種 Providencia 属 5 菌種 Rahnella 属 1 菌種 Raoultella 属 1 菌種	Salmonella 属 11 菌種 Serratia 属 9 菌種 Shigella 属 3 菌種 Tatumella 属 1 菌種 Vibrio 属 6 菌種 Yersinia 属 6 菌種 Yokenella 属 1 菌種
---	--	--

(例)

判定	項目	H ₂ S	ESC	PPA	IND	VP	CIT	LDC	ADH・ODC	ONPG	URE	MALO	ADO・ARA
陽性(+)		黒色	黒色 茶色	深緑色	赤色	赤色	青色	赤色	赤色	黄色	赤色 ピンク	青色	黄色
陽性限界		灰色	茶色	緑色	赤色	赤色	青色	赤色	赤色	黄色	赤色	青色	黄色
陰性(-)		無色	淡い 黄緑色	無色	黄色 無色	無色	黄色	黄色	黄色	無色	橙色 黄色	黄色	紫色

※一部、菌群を含みます。

品名	コード	包装	内容	価格	貯法・使用期限
IDテスト・EB-20	06626	25 検体用	EBプレート 25 枚 EBピヨン 25 本 滅菌流動パラフィン 20mL 成績書 13 枚×2	13,500 円	室温 製造後 1 年間
IDテスト・EB 試薬	06628	100 検体用	10%塩化第二鉄試液 6mL×1 6%α-ナフトール試液 6mL×1 ④40%水酸化カリウム試液 6mL×1 コバック試液 6mL×1	7,000 円	冷所に保存 製造後 1 年間

IDテスト・EB-9「ニッスイ」

腸内細菌科

- Citrobacter 属 2 菌種
- Hafnia 属 1 菌種
- Proteus 属 2 菌種
- Klebsiella 属 2 菌種
- Providencia 属
- Enterobacter 属 2 菌種
- Morganella 属 2 菌種
- Serratia 属 2 菌種
- Escherichia 属 2 菌種

承認番号20700AMZ00797000

(例)

IDテスト・EB-9「ニッスイ」判定色調表 日本製薬株式会社

判定	項目	IND	VP	CIT	MAN INO	LDC ODC	URE
陽性(+)		赤色	赤色	青色	黄色	赤色	赤色 ピンク
	陽性 限界						
陰性(-)		黄色 無色	無色	黄色	紫色	黄色	黄色 橙色

※一部、菌群を含みます。

品名	コード	包装	内容	価格	貯法・使用期限
IDテスト・EB-9	06673	50 検体用	EB-9 プレート 25 枚 × 2 EB ブイオン 50 本 滅菌流動パラフィン 20mL × 2 成績表 26 枚 × 2	14,500 円	室温 製造後 1 年間
IDテスト・EB-9 試薬	06671	100 検体用	コバック試液 6mL × 1 6% α-ナフトール試液 6mL × 1 ④40%水酸化カリウム試液 6mL × 1	4,000 円	冷所に保存 製造後 1 年間

IDテスト・NF-18「ニッスイ」

ブドウ糖非発酵性陰性桿菌

- Achromobacter 属 2 菌種
- Acinetobacter 属 4 菌種
- Alcaligenes 属
- Bergeyella 属 1 菌種
- Bordetella 属 2 菌種
- Brevundimonas 属 2 菌種
- Burkholderia 属 3 菌種
- Chryseobacterium 属 2 菌種
- Chryseomonas 属 1 菌種
- Comamonas 属 1 菌種
- Delftia 属 1 菌種
- Elizabethkingia 属 1 菌種
- Empedobacter 属 1 菌種
- Flavimonas 属 1 菌種

- Methylobacterium 属 1 菌種
- Moraxella 属
- Myroides 属 1 菌種
- Neisseria 属 2 菌種
- Ochrobactrum 属 1 菌種
- Oligella 属 2 菌種
- Pseudomonas 属 7 菌種
- Psychrobacter 属 2 菌種
- Ralstonia 属 2 菌種
- Rhizobium 属 1 菌種
- Shewanella 属 1 菌種
- Sphingobacterium 属 3 菌種
- Sphingomonas 属 2 菌種
- Stenotrophomonas 属 1 菌種

- Weeksella 属 1 菌種
- CDCグループ 4 菌種

承認番号20400AMZ01157000

(例)

IDテスト・NF-18「ニッスイ」判定色調表 日本製薬株式会社

判定	項目	GLU LAC	ESC	URE CIT	ONPG	LDC ODC	IND	NIT		GEL
							NO ₂	N ₂		
陽性(+)		黄色	黒色 茶色	赤色	黄色	赤色	赤色	茶色 赤色		黒色
	陽性 限界									
陰性(-)		赤色	淡い 黄緑色	橙色 黄色	無色	黄色	黄色 無色	無色		赤色 赤紫色

※一部、菌群を含みます。

品名	コード	包装	内容	価格	貯法・使用期限
IDテスト・NF-18	06629	25 検体用	NF プレート 25 枚 NF ブイオン 25 本 滅菌流動パラフィン 20mL × 2 成績表 13 枚 × 2	14,800 円	室温 製造後 1 年間
NF 試薬	06631	100 検体用	コバック試液 6mL × 1 亜硝酸塩検出試液 I 6mL × 1 亜硝酸塩検出試液 II 6mL × 1 亜鉛末 2.5g × 1	7,000 円	冷所に保存 製造後 1 年間

N-IDテスト・SP-18「ニッスイ」

ブドウ球菌属

- Micrococcus 属 1 菌種
- Staphylococcus 属 27 菌種

承認番号20400AMZ01072000

(例)

N-IDテスト・SP-18「ニッスイ」判定色調表 日本製薬株式会社

判定	項目	MAS FRU	PHO	VP	NIT	URE	ADH	βGL
陽性(+)		黄色	黒色 青灰色	赤色	赤色	赤色 ピンク	赤色	黄色
	陽性 限界							
陰性(-)		赤色	淡灰色 無色	無色	無色	橙色 黄色	黄色	無色

品名	コード	包装	内容	価格	貯法・使用期限
N-IDテスト・SP-18	06637	25 検体用	SP プレート 25 枚 SP ブイオン 25 本 滅菌流動パラフィン 20mL × 1 成績表 13 枚 × 2	14,800 円	室温 製造後 1 年間
SP 試薬	06638	100 検体用	6% α-ナフトール試液 6mL × 1 ④40%水酸化カリウム試液 6mL × 1 亜硝酸塩検出試液 I 6mL × 1 亜硝酸塩検出試液 II 6mL × 1	7,000 円	冷所に保存 製造後 1 年間

IDテスト・HN-20ラピッド「ニッスイ」

ヘモフィルス属・ナイセリア属
およびその類縁菌

- Actinobacillus 属 6 菌種
- Aggregatibacter 属 2 菌種
- Avibacterium 属 4 菌種
- Bergeriella 属 1 菌種
- Bibersteinia 属 1 菌種
- Bordetella 属 1 菌種
- Capnocytophaga 属 5 菌種
- Cardiobacterium 属 1 菌種
- Eikenella 属 1 菌種
- Gallibacterium 属 1 菌種
- Gardnerella 属 1 菌種
- Haemophilus 属 7 菌種
- Histophilus 属 1 菌種
- Kingella 属 2 菌種
- Mannheimia 属 1 菌種

- Moraxella 属 8 菌種
- Neisseria 属 10 菌種
- Oligella 属 2 菌種

- Pasteurella 属 7 菌種
- Psychrobacter 属 1 菌種
- Suttonella 属 1 菌種

承認番号20400AMZ01146000

(例)

IDテスト・HN-20ラピッド「ニッスイ」判定色調表 日本製薬株式会社

判定	項目	ALA	PHO	NIT		URE	ODC	IND	GLS PRO YGA	GLU XYL	O/N		BLA	
				NO ₂	N ₂						ONP 陽性	ONP 陰性	糖陽性	糖陰性
陽性(+)		黄色	青色	赤色		赤色 ピンク	赤色	赤色	黄色	黄色	黄色	ONP 陽性	ONP 陰性	黄色 橙色
	陽性 限界													
陰性(-)		無色	灰色 無色	無色		橙色 黄色	黄色	黄色 無色	無色	赤色	無色	ピンク 赤色	赤色 赤紫色	

※一部、菌群を含みます。

品名	コード	包装	内容	価格	貯法・使用期限
IDテスト・HN-20ラピッド	06635	25 検体用	HN プレート 25 枚 HN ブイオン 25 本 成績表 13 枚 × 2 β-ラクタマーゼ検出試液 3mL × 1 滅菌流動パラフィン 20mL × 1	20,000 円	室温 製造後 1 年間
HN 試薬	06640	100 検体用	コバック試液 6mL × 1 亜硝酸塩検出試液 I 6mL × 1 亜硝酸塩検出試液 II 6mL × 1 亜鉛末 2.5g × 1	7,000 円	冷所に保存 製造後 1 年間